

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



Art.Nr. 695300
variflex-Wanneneinstiegsgriff 30 cm



Art.Nr. 695450
variflex-Wanneneinstiegsgriff 45 cm



Art.Nr. 695545L
variflex L-Wanneneinstiegsgriff



Art.Nr. 695750C
variflex C-Wanneneinstiegsgriff halbrund

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren delficare-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung.



Die aktuellste Bedienungsanleitung kann auch als PDF beim Kundenservice angefordert werden. Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden.
Eine barrierefreie Gebrauchsanweisung in leichter und/oder einfacher Sprache ist seitens des Herstellers nicht lieferbar.

Konformitätserklärung:

Die delficare GmbH erklärt für das beschriebene Produkt die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745

Zweckbestimmung:

Der variflex Wanneneinstiegsgriff wird an der Außenwand der Badewanne montiert und erleichtert bzw. unterstützt das selbstständige Benutzen, Ein- und Aussteigen sowie Bewegen in der Badewanne. Sie ist für Personen konzipiert, die zwar noch eine gute Beweglichkeit und Kraft haben, jedoch durch Funktionsbeeinträchtigung der unteren Extremitäten zum selbständigen Benutzen, Ein- und Aussteigen bei der Benutzung der Badewanne eine sichere und stabile Abstützung und Unterstützung benötigen.

Indikation:

Sicherheitsgriffe und Aufrichthilfen kommen in verschiedenen Ausführungen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege in der Badewanne oder unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Sie sind dann indiziert, wenn die Standsicherheit und/oder die Muskelfunktion der unteren Extremitäten eingeschränkt ist. Das gilt auch für Griffe, die im Bereich der Toilette oder des Waschbeckens angebracht werden.

Kontraindikation:

Der variflex Wanneneinstiegsgriff ist nur zum Festhalten und Abstützen geeignet. Es dürfen keine Sitze oder andere Gegenstände eingehängt werden. Die Einstiegshilfe darf ebenso nicht zum Draufstehen- oder sitzen verwendet werden. Die variflex Einstiegshilfen dürfen nicht verwendet werden von Personen, die nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft hinzusetzen und aufzustehen, bzw. sich alleine nicht abstützen können.

Die Wanneneinstiegshilfe ist keine Aufrichthilfe !

**Geeignet sind nahezu alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe:
glatte oder raue Fliesen, Steine, Beton, Metall, Holz.**



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit! Keine Haftung auf PE, PP, PTEE (Teflon), Plexiglas, Polycarbonat, Acryl. Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen. Zur Erzielung einer optimalen Haftung kann es je nach Untergrund erforderlich sein die Oberfläche mechanisch aufzurauben oder einen Primer/Haftmittler einzusetzen.

Hinweis: Die Montage ist nur durch den autorisierten Fachhandel erlaubt!

Montage:



1. Lieferumfang

- 1 x Haltegriff
- 2 x Halterung Einstiegshilfe
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, delfi-clean, Vliestücher)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, 1 x Inbusschlüssel W6)
- 1 x Bedienungsanleitung

Achtung:

Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verwenden (Siehe MHD-Tubenfalz).



2. Reinigung der Klebeflächen

Sehr Wichtig! An den vorgesehenen Klebeflächen für das Klebesystem der Einstiegshilfe muss der Untergrund mit dem beigefügten Reinigungsset von allen Schmutzpartikeln und Haushaltsreiniger-Rückständen befreit sein!



3. Schutzfolie abziehen

Alle Schutzfolien der runden Klebeadapter auf der Rückseite der beiden Halterungen abziehen



3. Fixieren der Einstiegshilfe an der Badewannenaußenwand

Die Einstiegshilfe wie sie Ihnen vorliegt an der Badewannenaußenwand ausrichten. Dabei an der Badewannenkannte orientieren und so ausrichten, dass der Griff der Einstiegshilfe leicht unter der Badewannenkannte ist (nur bei variflex 30 und 45 möglich). Anschließend an der vorgesehenen und gereinigten Stelle an die Wand fest andrücken.

Orientieren Sie sich hierbei an eventuell vorhandenen Fliesenfugen. Achtung! Bei variflex L und variflex C muß die Unterkante vom Griff mind. 2,5 cm in der untersten Position über der Oberkante Wannenrand sein.



5. Haltegriff rausziehen

Halten Sie mit einer Hand den Griff oben fest, und mit der anderen Hand entriegeln Sie die beiden Rohre, in dem Sie die beiden Manschetten nach außen weg ziehen.

Ziehen Sie anschließend den Haltegriff nach oben aus der Halterung.



6. Entfernen der Halterung

Entfernen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels die Halterungen von der Wand (jeweils zwei Schrauben pro Halterung). Während der Demontage, den Griff nicht gegen die Wand drücken. Drücken Sie anschließend noch einmal kräftig auf alle vier Klebeadapter an der Badewannenaußenwand.



7. Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende um einen Falz entfalten, in den roten Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen. Tubenspitze fest und dicht in die große Öffnung stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der kleinen Öffnung sichtbar austritt.

Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!



8. Einstiegshilfe wieder anbringen

Schrauben Sie nun die zuvor in Schritt 6 entfernten Halterungen wieder an die Klebeadapter an der Badewannenaußenwand fest. Dabei auf die Ausrichtung der Halterung achten: „oben“ ist hier die Seite, welche zwei Löcher an der Halterung aufzeigt. Anschließend muss die Klappvorrichtung auf die Halterung aufgesteckt werden. An der Innenseite der Klappvorrichtung sehen Sie einen Stift, dieser ist „oben“ (siehe Definition oben).




9. Anbringen der Halterung Einstiegshilfe

Anschließend muss die Halterung Einstiegshilfe auf die Halterung aufgesteckt werden. An der Innenseite der Halterung Einstiegshilfe sehen Sie einen Stift, dieser ist „oben“ (siehe Definition Punkt 8). Halterung Einstiegshilfe in untere Rastvorrichtung vorsichtig andrücken bis ein Klickgeräusch zu hören ist.



10. Kleber 24 Stunden aushärten lassen.

In dieser Zeit das Griffsystem nicht belasten und 12 Stunden vor direkter Feuchtigkeit schützen.

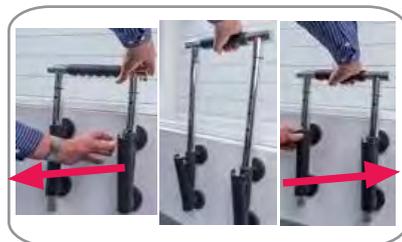

11. Höhenverstellung

Um die Höhe zu verstellen, halten Sie mit einer Hand den Griff oben fest, und mit der anderen Hand ziehen Sie an beiden äußeren Enden beim Logo die Rastblende vom Griff weg. Diese müssen Sie an den beiden Seiten durchführen. Anschließend stellen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ein. Achten Sie hierbei darauf, dass auf beiden Seiten das Loch vom Rohr sichtbar ist. Anschließend beide Rastblenden wieder fest andrücken, bis sie spürbar einrasten.

Demontage:

1. Klebeadapter entfernen



Der Klebeadapter lässt sich am besten mit einer Rohrzange drehend ablösen.

Tipp: Vorher mit einem Cuttermesser vorsichtig ringsherum einritzen.

Alternativ: In 10 mm Schritten mit unserer Spezialspachtel Art. 70170 vorsichtig den Kleber durchtrennen.



2. Klebereste entfernen

Eventuell vorhandene Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Siliconentferner oder Aceton.

Benutzung:

Sicherheitshinweise

- Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen.
- Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.
- Um die Klebewirkung zu testen, muss vor jeder Benutzung, aus sicherem Stand, an dem Griff gerüttelt werden.
- **Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen/fensterlosen Räumen, notwendig.**
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. In Deutschland ist es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Berlin, www.bfarm.de

Reinigen/Desinfektion

Nach 24 Stunden können zur Pflege des Haltegriffs ein Mikrofaserstuch + wenige Tropfen Spülmittel verwendet werden. Wisch- oder Sprühdeseinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung / Wiedereinsatz

Das variflex Griffsystem ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, das Griffsystem bitte an Ihren Fachhandel übergeben. Ein Wiedereinsatz ist durch den Einsatz eines Sericepacks mit der Art.Nr. 695100 (neues Klebeadapter-Set) möglich.

Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde das Griffsystem auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite	Grifflänge	Griffdurchmesser	Gewicht	Höhe über Wannenrand
695300	variflex-30	30x8 cm	30 cm	3,7 cm	1,75 kg	0-18,5 cm
695450	variflex-45	45x8 cm	45 cm	3,7 cm	1,85 kg	0-18,5 cm
695545L	variflex - L	47,5x11,5 cm	2x25 cm	3,7 cm	1,85 kg	2,5-21 cm
695750C	variflex - C	31,5x23 cm	32x22 cm	3,2 cm	1,75 kg	2,5-21 cm

Material: Edelstahl, poliert / Kunststoff / Gummi TPE-E / GRIVORY GV-5H SCHWARZ 9915 und PA 6

Höhenverstellbarkeit: 18,5 cm in 4 Schritten

Optimale Verarbeitungstemperatur 15-30 Grad, ggf. zu beklebende Oberfläche mit einem Föhn erwärmen.



Max. Belastbarkeit 100 kg

1 Hersteller | 2 Artikelnummer | 3 Artikelbezeichnung |
4 UDI-Code | 5 Max. Belastung | 6 Gebrauchsanweisung beachten |
7 Medizinprodukt | 8 Seriennummer | 9 Produktionsdatum (Jahr-Monat).

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt.

Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt.

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de