

varilum

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



- 696300s varilum Haltegriff 30 cm schwarz
- 696450s varilum Haltegriff 45 cm schwarz
- 696600s varilum Haltegriff 60 cm schwarz
- 696300w varilum Haltegriff 30 cm weiss
- 696450w varilum Haltegriff 45 cm weiss
- 696600w varilum Haltegriff 60 cm weiss

Das **varilum** Grifffsystem ist als Haltegriff und Aufrichthilfe für Personen konzipiert, die die tägliche Körperpflege nicht ohne Hilfsmittel selbständig erledigen können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Standsicherheit und/oder die Muskelfunktion der unteren Extremitäten eingeschränkt ist. Anwendungsbereiche sind insbesondere Bad und Toilette.

Achtung! Das **varilum** Grifffsystem ist nur zum Festhalten und Abstützen geeignet. Es dürfen keine Sitze oder andere Gegenstände eingehängt werden.

Maximale Belastung: 100 kg (Zugkraft)

Geeignet sind beinahe alle soliden, planen (kein Fliesenversatz) und tragfähigen Untergründe:

glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz.



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit, und Mosaikfliesen! Keine Haftung auf Kunststoffen wie PE, PP, PTEE (Teflon). Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen.

Montage:

1. Lieferumfang



- 1 x varilum Haltegriff
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, Reinigungstücher)
- 1 x Klebeset (Klebetuben u. rote Schlüssel)
- 1 x Maulschlüssel 10 mm
- 1 x Bedienungsanleitung

Achtung: Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verwenden (Siehe MHD-Tubenfalz).



Vor der Montage des Griffsystems Untergrund prüfen:

Bei Hohlklang der Fliesen oder Fliesenversatz:
Montage mit Dübel und Schrauben!

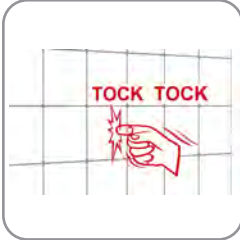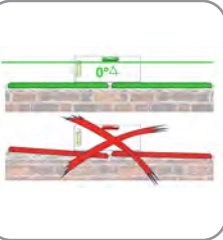

2. Reinigung der Klebeflächen

1. Vorreinigen mit Schleifschwamm
 2. Reinigen mit beigefügtem Reinigungstuch
 3. Trocken reiben
- (Keine anderen Reinigungsmittel verwenden, vorgehensweise wie auf dem Reinigungsset beschrieben)

Tipp: Im Nassbereich und bei älteren Fliesen
delfi-clean Art. 70150 verwenden.

Wichtiger Montagehinweis!

Klebeflächen:

1. Vorreinigen mit Schleifschwamm
2. Reinigen mit beigefügtem Reinigungstuch
3. Trocken reiben
4. Klebeadapter anbringen

3. Schutzfolie abziehen

Die Rosette ganz nach hinten schieben.

Schutzfilm von der Rückseite des Klebeadapters abziehen.



4. Haltegriff andrücken

An den vorgesehenen gereinigten Flächen fixieren
und fest andrücken.



5. Haltegriff abschrauben

Mit dem mitgelieferten Maulschlüssel (Größe 10) die beiden Muttern am Klebeadapter nach links drehend lösen.
Dann kann der Haltegriff abgenommen werden.
Klebeadapter andrücken.
Den Klebering ringsherum fest andrücken.






6. Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende um einen Falz entfalten, in den roten Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen. **Tubenspitze fest und dicht** in die große Öffnung stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der kleinen Öffnung sichtbar austritt.

Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!

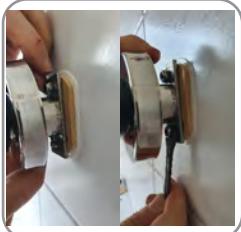

7. Haltegriff wieder anbringen

Haltegriff aufstecken und die beiden Muttern mit dem Maulschlüssel rechts drehend festziehen.



Die Rosette mit dem Gummiring vorsichtig an die Wand schieben.



8. Kleber 24 Stunden aushärten lassen.

In dieser Zeit das Griffsystem nicht belasten und 12 Stunden vor direkter Feuchtigkeit schützen.



1. Demontage - Klebeadapter entfernen

Der Klebeadapter lässt sich am besten mit einer Rohrzanze drehend ablösen.

Tipp: Vorher mit einem Cuttermesser vorsichtig ringsherum einritzen.

Alternativ: In 10 mm Schritten mit unserer Spezialspachtel Art. 70170 vorsichtig den Kleber durchtrennen.



2. Demontage - Klebereste entfernen

Eventuell vorhandene Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Siliconentferner oder Aceton.

Benutzung

Sicherheitshinweise

- Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen.
- Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.
- Um die Klebewirkung zu testen, muss vor jeder Benutzung, aus sicherem Stand, an dem Griff gerüttelt werden.
- **Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen/fensterlosen Räumen, notwendig.**

Reinigen/Desinfektion

Nach 24 Stunden können zur Pflege des Haltegriffs ein Mikrofaserstuch + wenige Tropfen Spülmittel verwendet werden.
Wisch- oder Sprühdeseinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung / Wiedereinsatz

Das varilum Griffsystem ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, das Griffsystem bitte an Ihren Fachhandel übergeben.
Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.

Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde das Griffsystem auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grifflänge	Material
696300s	varilum Haltegriff schwarz	30 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696450s	varilum Haltegriff schwarz	45 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696600s	varilum Haltegriff schwarz	60 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696300w	varilum Haltegriff weiss	30 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696450w	varilum Haltegriff weiss	45 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696600w	varilum Haltegriff weiss	60 cm	Aluminium pulverbeschichtet

Optimale Verarbeitungstemperatur 15-30 Grad, ggf. zu beklebende Oberfläche mit einem Föhn erwärmen.

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



Max. Belastbarkeit 100 kg



SYSTEM-PARTNER



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weissenbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de