

# varinox

## GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



- Art.Nr. 694300 varinox-Haltegriff 30 cm
- Art.Nr. 694450 varinox-Haltegriff 45 cm
- Art.Nr. 694600 varinox-Haltegriff 60 cm
- Art.Nr. 694545LK varinox LK-Winkelgriff mit Ablagekorb
- Art.Nr. 694545L varinox L-Winkelgriff
- Art.Nr. 694750C varinox C-Haltegriff halbrund
- Art.Nr. 694850S varinox S-Haltegriff geschwungen

Das **varinox** Grifffsystem ist als Haltegriff und Aufrichthilfe für Personen konzipiert, die die tägliche Körperpflege nicht ohne Hilfsmittel selbständig erledigen können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Standsicherheit und/oder die Muskelfunktion der unteren Extremitäten eingeschränkt ist. Anwendungsbereiche sind insbesondere Bad und Toilette.

**Achtung!** Das **varinox** Grifffsystem ist nur zum Festhalten und Abstützen geeignet. Es dürfen keine Sitze oder andere Gegenstände eingehängt werden.

**Maximale Belastung: 100 kg (Zugkraft)**

**Geeignet sind beinahe alle soliden, planen (kein Fliesenversatz) und tragfähigen Untergründe:**

**glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz.**



*Holz*



*Fliesen*



*Glas*



*Granit*



*Marmor*



*Stein*

**Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit, und Mosaikfliesen! Keine Haftung auf Kunststoffen wie PE, PP, PTEE (Teflon). Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen.**

# Montage:

## 1. Lieferumfang

- 1 x varinox Haltegriff
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, Reinigungstücher)
- 1 x Klebeset (Klebetuben u. rote Schlüssel)
- 1 x Maulschlüssel 10 mm
- 1 x Bedienungsanleitung

**Achtung:** Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verwenden (Siehe MHD-Tubenfalz).

## Vor der Montage des Griffsystems Untergrund prüfen:

Bei Hohlklang der Fliesen oder Fliesenversatz:  
Montage mit Dübel und Schrauben!

TOCK TOCK



## Wichtiger Montagehinweis!

### Klebeflächen:

1. Vorreinigen mit Schleifschwamm
2. Reinigen mit beigefügtem Reinigungstuch
3. Trocken reiben
4. Klebeadapter anbringen

## 2. Reinigung der Klebeflächen

1. Vorreinigen mit Schleifschwamm
2. Reinigen mit beigefügtem Reinigungstuch
3. Trocken reiben  
(Keine anderen Reinigungsmittel verwenden, vorgehensweise wie auf dem Reinigungsset beschrieben)

**Tipp: Im Nassbereich und bei älteren Fliesen delfi-clean Art. 70150 verwenden.**

## 3. Schutzfolie abziehen

Die Rosette ganz nach hinten schieben.

Schutzfilm von der Rückseite des Klebeadapters abziehen.

## 4. Haltegriff andrücken

An den vorgesehenen gereinigten Flächen fixieren und fest andrücken.






## 5. Haltegriff abschrauben

Mit dem mitgelieferten Maulschlüssel (Größe 10) die beiden Muttern am Klebeadapter nach links drehend lösen.

Dann kann der Haltegriff abgenommen werden.

Klebeadapter andrücken.

Den Klebering ringsherum fest andrücken.

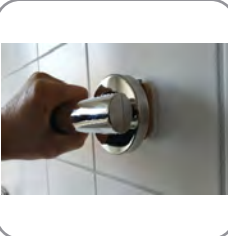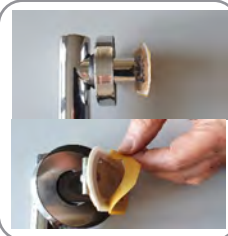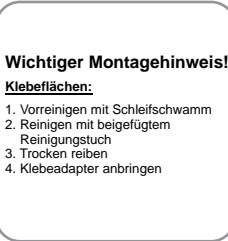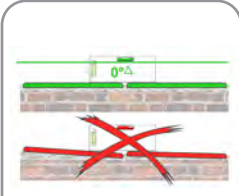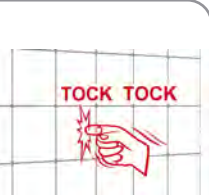




## 6. Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende um einen Falz entfalten, in den roten Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen. **Tubenspitze fest und dicht** in die große Öffnung stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der kleinen Öffnung sichtbar austritt.

**Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken** damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!

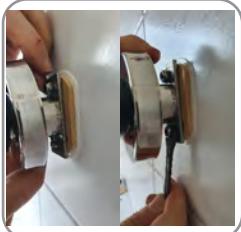

## 7. Haltegriff wieder anbringen

Haltegriff aufstecken und die beiden Muttern mit dem Maulschlüssel rechts drehend festziehen.




Die Rosette mit dem Gummiring vorsichtig an die Wand schieben.



## 8. Kleber 24 Stunden aushärten lassen.

In dieser Zeit das Griffsystem nicht belasten und 12 Stunden vor direkter Feuchtigkeit schützen.

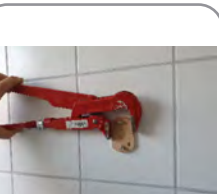

## 1. Demontage - Klebeadapter entfernen

Der Klebeadapter lässt sich am besten mit einer Rohrzanze drehend ablösen.

Tipp: Vorher mit einem Cuttermesser vorsichtig ringsherum einritzen.

Alternativ: In 10 mm Schritten mit unserer Spezialspachtel Art. 70170 vorsichtig den Kleber durchtrennen.



## 2. Demontage - Klebereste entfernen

Eventuell vorhandene Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Siliconentferner oder Aceton.

## Benutzung

### Sicherheitshinweise

- Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen.
- Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.
- Um die Klebewirkung zu testen, muss vor jeder Benutzung, aus sicherem Stand, an dem Griff gerüttelt werden.
- **Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen/fensterlosen Räumen, notwendig.**

### Reinigen/Desinfektion

Nach 24 Stunden können zur Pflege des Haltegriffs ein Mikrofaserstuch + wenige Tropfen Spülmittel verwendet werden.  
Wisch- oder Sprühdeseinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

### Wartung / Wiedereinsatz

Das varinox Griffsystem ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, das Griffsystem bitte an Ihren Fachhandel übergeben.  
Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.

### Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde das Griffsystem auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

### Technische Daten:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grifflänge	Material
694300	varinox-Haltegriff	30 cm	Edelstahl
694450	varinox-Haltegriff	45 cm	Edelstahl
694600	varinox-Haltegriff	60 cm	Edelstahl
694545LK	varinox LK-Winkelgriff	2x45 cm	Edelstahl
694545L	varinox L-Winkelgriff	2x45 cm	Edelstahl
694750C	varinox C-Haltegriff	32x22 cm	Edelstahl
694850S	varinox S-Haltegriff	45 cm	Edelstahl

Optimale Verarbeitungstemperatur 15-30 Grad, ggf. zu beklebende Oberfläche mit einem Föhn erwärmen.

### ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt.  
Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

### GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



Max. Belastbarkeit 100 kg



SYSTEM-PARTNER



delficare GmbH  
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1  
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11  
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24  
e-mail: info@delficare.de  
Web: www.delficare.de