

varioporto XXL

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



Der varioporto XXL ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 gem. MDR Anhang VIII.

Indikation:

Der varioporto XXL Duschklapsitz ist für schwergewichtige Personen konzipiert, bei denen folgende Funktionseinschränkungen auftreten:

Standunsicherheit/Stehunfähigkeit bei Gebrauchsminderung/ fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten oder andere, die Standsicherheit beeinträchtigende Erkrankungen (z.B. Kraftverlust bei bösartigen Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz/Kreislauf- und Lungenerkrankungen), so, dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch ermöglicht wird.

Kontraindikation:

Achtung: Der varioporto XXL Duschklapsitz ist nur zum Sitzen für Personen bis max. 250 kg Körpergewicht geeignet. Er darf nicht verwendet werden bei Personen, die nicht in der Lage sind, ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren. Er darf nicht als Aufstiegshilfe oder zu ähnlichen Zwecken verwendet werden.

**Geeignet sind beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe:
glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe.**



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit! Keine Haftung auf PE, PP, PTEE (Teflon), Plexiglas, Polycarbonat. Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen. Zur Erzielung einer optimalen Haftung kann es je nach Untergrund erforderlich sein die Oberfläche mechanisch aufzurauben oder einen Primer/Haftmittler einzusetzen.

Montage

Lieferumfang:

- 1 x Duschklapsitz varioporto XXL
- 2 Paar Stellfüße (montiert)
- 1 x Reinigungsset (Scheuermilch, Schleifschwamm, delfi-clean, Vliestücher)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, Bedienungsanleitung)



Achtung: Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verbrauchen (Siehe MHD-Aufdruck Tubenfalz).

Vor der Montage des Duschklapsitzes Untergrund prüfen:

Bei Fliesenversatz:

Montage mit Bohradapter, mit Dübel und Schrauben!

Zusatzhinweis: Der Duschklapsitz varioporto XXL ist für Duschwannen mit Rändern bis max. 5 x 5 cm geeignet.

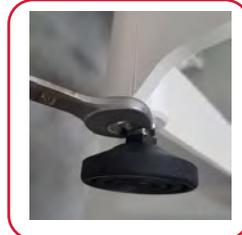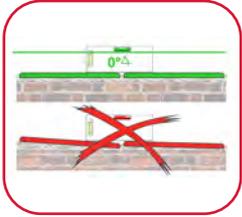

Sitzfläche justieren

Für eine waagrechte Sitzfläche müssen zum Ausgleich des Gefälles der Duschwanne die Stellfüße an den Füßen angepasst werden.

- Kontermutter lösen (Schlüsselweite 13).
- Durch Herausdrehen der Stellfüße die notwendige Höhe einstellen.
- Kontermutter wieder festdrehen.

Montage der Sitzeinheit


Reinigung des Untergrundes

Sehr Wichtig! An den vorgesehenen Klebeflächen für das Klebesystem der Sitzeinheit muss der Untergrund mit dem beigelegten Reinigungsset (Bild) von allen Schmutzpartikeln und Haushaltsreiniger-Rückständen befreit sein!


Die Reihenfolge, ist genau wie auf dem Deckblatt beschrieben, einzuhalten!



Nach Reinigung des Untergrundes

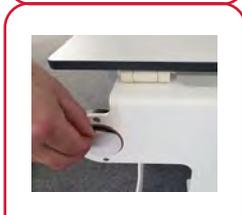

Alle Schutzfolien des Klebesystems abziehen. (Bild)

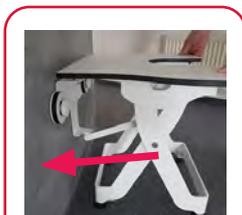

Jetzt die gesamte Sitzeinheit im Bereich der Verklebung fest an die Wand andrücken.




Sternschrauben herausdrehen

Die Sternschrauben auf der linken und rechten Seite der Wandhalterung nach links heraus drehen.

Jetzt lässt sich die gesamte Sitzeinheit entfernen.

Fliesenfugen ggf. mit der beiliegenden Dichtmasse abdichten.

Klebeadapter nochmals anrücken.

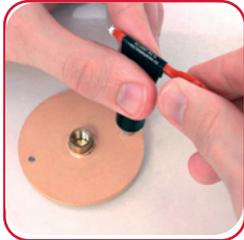

Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende in den roten Schlüssel einfädeln. **Tubenspitze** durch eine kleine Drehung **fest und dicht** in die Einfüllöffnung stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der anderen Öffnung sichtbar austritt.

Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!




Sitzeinheit befestigen


Die gesamte Sitzeinheit über den beiden Klebeadapter positionieren und beide Sterngriffschrauben nach rechts eindrehen.

Kleber aushärten lassen

In den ersten 24 Stunden muss die Sitzeinheit in der **waagrechten, abgestützten** Position verbleiben und die Klebeadapter müssen vor direkter Feuchtigkeit geschützt sein. Die vollständige Belastung der Sitzeinheit ist nach 24 Stunden möglich.

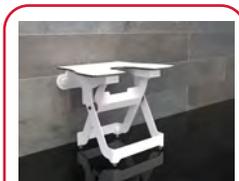

0 - 24 Stunden

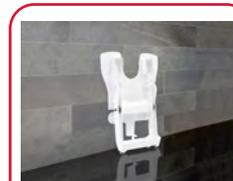

ab 24 Stunden

Demontage der Sitzeinheit

Sterngriffschrauben lösen, bis sich die Sitzeinheit entfernen lässt.



Die beiden Klebeadapter lassen sich mit einer angeschliffenen Spachtel (Unsere Art.Nr. 70170) in 1 cm breiten Bahnen (nicht auf einmal!) entfernen, oder alternativ mit einer Rohrzanze drehend ablösen



Klebereste entfernen

Klebereste mit einem Glasschaber entfernen.

Bei Rückständen in rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Siliconentferner oder Aceton.

Benutzung

Sicherheitshinweise

Achtung:

Der Kleber für die Wandbefestigung ist für den Nassbereich geeignet, muß aber regelmäßig abtrocknen können. Achten Sie deshalb - besonders wenn mehrere Personen nacheinander Duschen, und in fensterlosen Badezimmern - für gute Lüftung! (ggf. Badezimmer- und Duschkabinentür offen halten)

Der Duschklapsitz darf nur verwendet werden, wenn er fest mit der Wand verbunden ist!

Kipp- und Ausrutschgefahr !

Immer ruhig in der Mitte der Sitzeinheit sitzen. Immer gerade auf der Sitzeinheit sitzen.

Beim Hinsetzen und Aufstehen -falls notwendig- eine Betreuungsperson zu Hilfe nehmen.

Alle Stellfüße müssen auf dem Boden aufstehen. Beim Falten der Sitzeinheit besteht Klemmgefahr für die Hände, deshalb die Sitzplatte nur von vorne anfassen.

Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen. Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.

Bei Montagefehler (z.B. nicht ausreichende Reinigung) oder der Montage auf ungeeigneten Untergründen (z.B. nanobeschichteten Oberflächen) kann eine anfänglich optimale Klebewirkung im Laufe der Zeit nachlassen. Die Klebekraft sollte daher vor jeder Anwendung durch den Benutzer geprüft werden.

Bei der Durchführung der Prüfung ist darauf zu achten, dass die beiden Sternschrauben fest angezogen sind. Sollte sich bei dieser Prüfung herausstellen, dass die Klebewirkung **zur Wand** nachgelassen hat, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.

Wenden Sie sich in diesem Falle an die Firma, die den Duschklapsitz installiert hat.

Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen Räumen, notwendig.

Duschklapsitz falten

Zum Zusammenfallen die Sitzeinheit hoch ziehen.

Zum Auseinanderfallen die Sitzeinheit nach vorne ziehen.

Die Fußstütze klappt selbstständig ein und aus.

Reinigen/Desinfektion

Nach voller Belastbarkeit des Duschklapsitz können zur Pflege haushaltsübliche Reinigungsmittel verwendet werden (PH-Wert >5).

Wischdesinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung / Wiedereinsatz

Der Duschklapsitz ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Duschklapsitz bitte an Ihren Fachhandel übergeben. Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.


Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen.

Auf dieser Grundlage wurde der varioporto XXL auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten

Art.Nr.:	75059	Typenschild:
Breite:	590 mm	
Tiefe:	475 mm	
Sitztiefe:	440 mm	
Sitzhöhe:	500 mm	
Gewicht:	9,5 kg	
Max. Belastung:	250 kg	
Materialien:	Aluminium, Kunststoff	
Verarbeitungstemperatur:	15 - 25 °C	

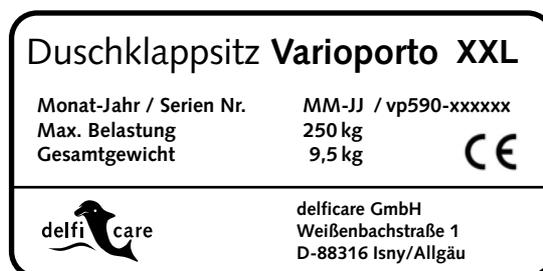

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt.

Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt.

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler.

Hievon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben.

Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißenbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de