

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



Der variopresa ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 gem. MDR Anhang VIII.

Indikation:

Der variopresa Schwenkstützgriff wird an der Wand der Toilette montiert und erleichtert bzw. unterstützt das selbstständige Benutzen der Toilette.

Er ist für Personen konzipiert, die zwar noch eine gute Beweglichkeit und Kraft haben, jedoch durch Funktionsbeeinträchtigung der unteren Extremitäten zum selbständigen Hinsetzen und Aufstehen bei der Benutzung der Toilette eine sichere und stabile Abstützung ihres Körpergewichts benötigen. Durch das Doppel-Klebesystem ist der Schwenkstützgriff besonders sicher.

Kontraindikation:

Der variopresa Schwenkstützgriff darf nicht verwendet werden, von Personen, die nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft hinzusetzen und aufzustehen.

**Geeignet sind beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe:
glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe.**



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit! Keine Haftung auf PE, PP, PTEE (Teflon), Plexiglas, Polycarbonat, Acryl. Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen. Zur Erzielung einer optimalen Haftung kann es je nach Untergrund erforderlich sein die Oberfläche mechanisch aufzurauen oder einen Primer/Haftmittler einzusetzen.


Montage

Lieferumfang:


- 1 x Stützklappgriff
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, delfi-clean, Vliestücher)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, 1 x Torxschlüssel Gr. 25)
- 1 x Bedienungsanleitung

Achtung: Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verwenden (Siehe MHD-Tubenfalz).

Vor der Montage des Schwenkstützgriffes Untergrund prüfen:

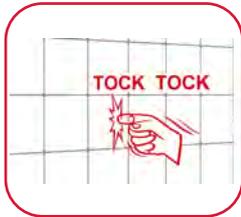

Bei Hohlklang:
Montage mit Dübel und Schrauben!

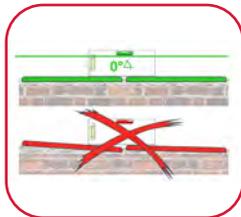

Bei Fliessenversatz:
Montage mit Dübel und Schrauben!



1. Reinigen des Untergrunds

Sehr Wichtig! An den vorgesehenen Klebeflächen für das Klebesystem der Sitzeinheit muss der Untergrund mit dem beigefügten Reinigungsset von allen Schmutzpartikeln und Haushaltsreiniger-Rückständen befreit sein!




2. Höheneinstellung des Stützfußes

Den Schwenkstützgriff ausklappen.
Zur Höheneinstellung des Stützfußes schieben Sie das Innenrohr in die gewünschte Position und fixieren dieses mit Hilfe der Klammer.
Mögliche Höhen: 70 - 85 cm in 2,5 cm Abständen.



3. Abziehen aller Schutzfolien

Alle Schutzfolien auf der Rückseite der Grundplatte sowie der runden Klebeadapter abziehen.

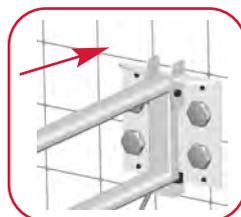


4. Fixieren des Schwenkstützgriffes an der Wand

Den aufgeklappten Schwenkstützgriff auf dem Stützfuß abstützen.

Achtung: Stützfuß muss senkrecht stehen

Die gesamte aufgeklappte Griffeinheit an der vorgesehenen und gereinigten Stelle an die Wand **fest andrücken**.


Orientieren Sie sich hierbei an eventuell vorhandenen Fliesenfugen

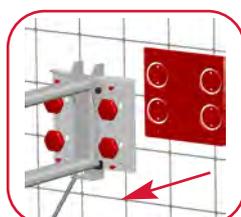

5. Die jeweils beiden Torxschrauben links und rechts des Schwenkbügels mit dem mitgelieferten Torxschlüssel herausdrehen. Ebenso die beiden Sterngriffschrauben. Jetzt lässt sich der Schwenkstützgriff von der Grundplatte entfernen.

Drücken Sie nochmals die Grundplatte und die runden Klebeadapter einige Sekunden fest an die Wand.


Fliesenfugen ggf. mit der beiliegenden Dichtmasse abdichten.

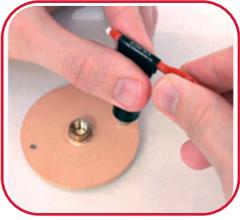

6. Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende in den roten Schlüssel einfädeln. **Tubenspitze** durch eine kleine Drehung **fest und dicht** in eine der runden Einfüllöffnungen stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der anderen Öffnung sichtbar austritt.

Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!

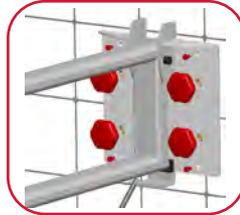


7. Schwenkstützgriff wieder befestigen.

Den Schwenkstützgriff über der Grundplatte positionieren und die vier Torxschrauben wieder nach rechts eindrehen, anschließend die Sterngriffschrauben.

Den Schwenkstützgriff vorsichtig nach oben klappen.

Kleber aushärten lassen

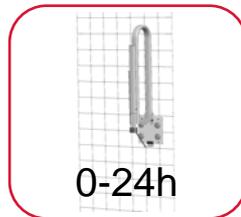

0-24h


8. Die vollständige Belastung ist nach 24 Stunden möglich




Demontage

1. Entfernen der Grundplatte mit einer Spachtel


Tipp: Die Grundplatte lässt sich leichter entfernen wenn diese zuvor erwärmt wird (z.B. Fön)

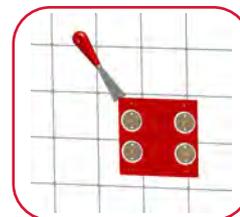

2. Entfernen der Klebeadapter mit der Rohrzange

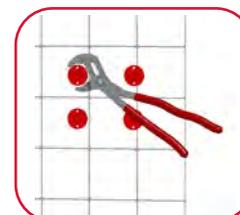

3. Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei Rückständen in rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Silikonentferner oder Aceton

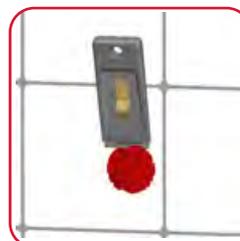


Benutzung

Sicherheitshinweise

Beim Anbringen des Produktes ist die Anbauhöhe gemäß DIN 18040 zu beachten. Die Montage hat aus Sicherheitsgründen durch einen Fachmann der Installationstechnik zu erfolgen. Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen. Für die Sicherheit heit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden. Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen/ fensterlosen Räumen, hilfreich.

Achtung!

Der Schwenkstützgriff ist nicht für Rollstuhlfahrer zum seitlichen Übersetzen geeignet.

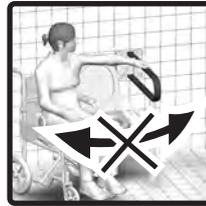

Reinigen/Desinfektion

Nach 24 Stunden können zur Pflege des Schwenkstützgriff haushaltsübliche Reinigungsmittel verwendet werden. Wisch- oder Sprühdesinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung/Wiedereinsatz

Der Schwenkstützgriff ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Schwenkstützgriff bitte an Ihren Fachhandel übergeben. Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.

Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde der variopresa auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten:

Art.Nr.	Griffrohrlänge	Griffrohr Ø (BxH)	Gesamtlänge	Höheneinstellung von - bis	Maß Grundplatte	Gewicht	Material	max. Belastung
68650	65 cm	50x25 mm	78 cm	70-85 cm	20x25 cm	2,7 kg	Aluminium/Kunststoff	130 kg
68800	80 cm	50x25 mm	92 cm	70-85 cm	20x25 cm	2,9 kg	Aluminium/Kunststoff	25 kg



Verarbeitungstemperatur: 5 - 25 °C

Typenschild:



ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt. Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de