


vario punta

Stützgriffe für Waschbecken
und Toilette

ohne bohren

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG

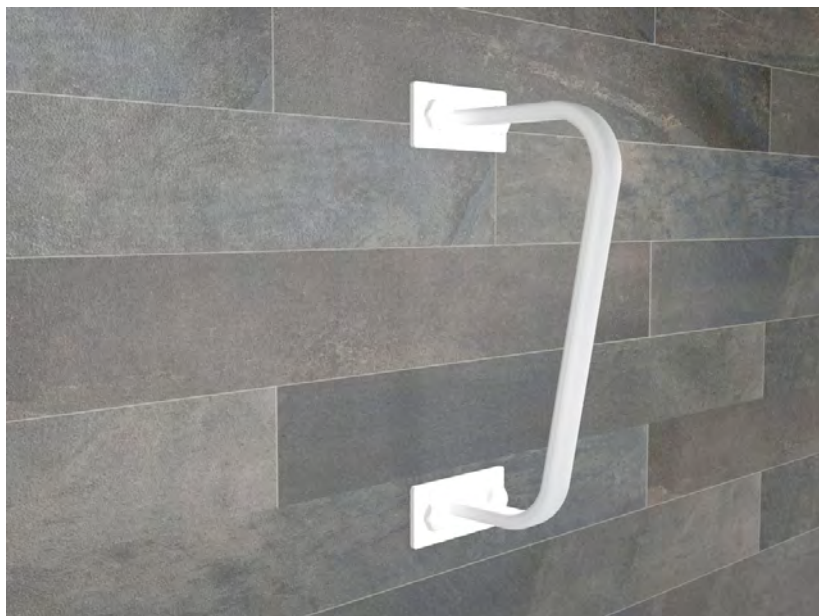

Der Universalstützgriff variopunta ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 gem. MDR Anhang VIII.

Indikation:

Die variopunta Stützgriffe werden an der Wand, z.B. neben dem Waschbecken oder der Toilette montiert.

Sie sind für Personen konzipiert die zwar noch eine gute Beweglichkeit und Kraft haben, jedoch schon Abstützung und Unterstützung brauchen um weiterhin selbstständig die oben genannten Vorrichtungen zu benutzen.

Kontraindikation:

Die variopunta Stützgriffe dürfen nicht verwendet werden von Personen, die nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft hinzusetzen und aufzustehen, bzw. sich alleine nicht abstützen können.

**Geeignet sind beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe:
glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe.**



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit! Keine Haftung auf PE, PP, PTEE (Teflon), Plexiglas, Polycarbonat, Acryl. Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen. Zur Erzielung einer optimalen Haftung kann es je nach Untergrund erforderlich sein die Oberfläche mechanisch aufzurauchen oder einen Primer/Haftmittler einzusetzen.

Montage


Lieferumfang:

- 1 x Stützgriff
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, delfi-clean Haftreiniger, Vliestücher)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, 1 x Inbusschlüssel Gr. 4)
- 4 x Abdeckkappen für Inbusschrauben
- 1 x Gebrauchs- und Montage-Anleitung

Vor der Montage des Stützgriff Untergrund prüfen:



Bei Hohlklang:
Montage mit Dübel und Schrauben!
Verwenden Sie in diesem Fall unsere Bohradapter (Art.Nr. 70100) gemäß der dort beiliegenden Montageanleitung.

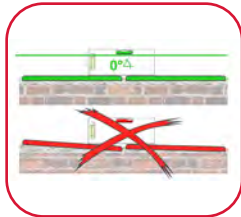

Bei Fliesenversatz:
Montage mit Dübel und Schrauben!
Verwenden Sie in diesem Fall unsere Bohradapter (Art.Nr. 70100) gemäß der dort beiliegenden Montageanleitung.



1. Reinigen des Untergrunds

Sehr Wichtig! An den vorgesehenen Klebeflächen für das Klebesystem der Sitzeinheit muss der Untergrund mit dem beigefügten Reinigungsset von allen Schmutzpartikeln und Haushaltsreiniger-Rückständen befreit sein!



2. Abziehen aller Schutzfolien


Alle Schutzfolien auf der Rückseite der Grundplatte sowie der runden Klebeadapter abziehen.



3. Fixieren des Stützgriff an der Wand

Den Stützgriff an der vorgesehenen und gereinigten Stelle **senkrecht** an die Wand **fest andrücken**.


Orientieren Sie sich hierbei an eventuell vorhandenen Fliesenfugen

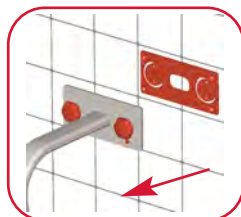

4. Die jeweils beiden Inbusschrauben links und rechts des Griffs mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel herausdrehen. Ebenso die beiden Sterngriffschrauben. Jetzt lässt sich der Stützgriff von der Grundplatte entfernen.

Drücken Sie nochmals die Grundplatte und die runden Klebeadapter einige Sekunden fest an die Wand.


Fliesenfugen ggf. mit der beiliegenden Dichtmasse abdichten.

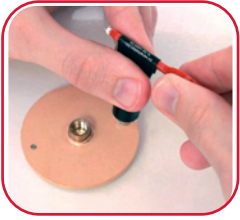

5. Kleber einfüllen

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstechen. Tubenende in den roten Schlüssel einfädeln. **Tubenspitze** durch eine kleine Drehung **fest und dicht** in eine der runden Einfüllöffnungen stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der anderen Öffnung sichtbar austritt.


Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!

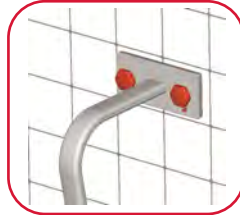


6. Stützgriff wieder befestigen.

Den Stützgriff über der Grundplatte positionieren und die vier Inbusschrauben wieder nach rechts eindrehen, anschließend die Sterngriffschrauben.

Kleber aushärten lassen

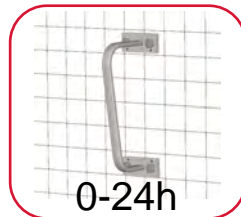

7. Den Stützgriff die ersten 24 Stunden nicht belasten!

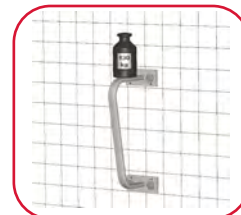

8. Die vollständige Belastung ist nach 24 Stunden möglich

Demontage




1. Entfernen der Grundplatte mit einer Spachtel

Tipp: Die Grundplatte lässt sich leichter entfernen wenn diese zuvor erwärmt wird (z.B. Fön)



2. Entfernen der Klebeadapter mit der Rohrzange

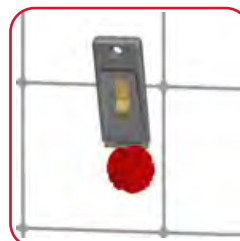

3. Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei Rückständen in rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Silikonentferner oder Aceton

Benutzung

Sicherheitshinweise

Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen. Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.

Um die Klebewirkung zu testen, muss vor jeder Benutzung, aus sicherem Stand, an dem Griff gerüttelt werden.

Für eine optimale Regenerierung des Klebers ist eine regelmäßige Lüftung, besonders bei geschlossenen/fensterlosen Räumen, notwendig.

Reinigen/Desinfektion

Nach 24 Stunden können zur Pflege des Stützgriffs haushaltsübliche Reinigungsmittel verwendet werden.

Wisch- oder Sprühdesinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung / Wiedereinsatz

Der Stützgriff ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Stützgriff bitte an Ihren Fachhandel übergeben.

Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.


Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde das Griffsystem auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten:


| Art.Nr. | Griffrohrtiefe (oben) | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Griffrohr | Maß Grundplatte | Gewicht | max. Belastung | Material |
|---------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| 67200 | 20 cm | 28 cm | 52 cm | 5x2,5 cm | 22x9 cm | 2,0 kg | 100 kg | Aluminium/Stahl |
| 67350 | 35 cm | 43 cm | 52 cm | 5x2,5 cm | 22x9 cm | 2,1 kg | 100 kg | Aluminium/Stahl |
| 67500 | 50 cm | 58 cm | 52 cm | 5x2,5 cm | 22x9 cm | 2,2 kg | 100 kg | Aluminium/Stahl |


Verarbeitungstemperatur: 5 - 25 °C

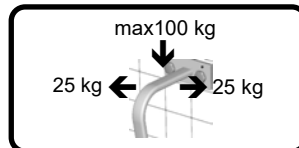


Typenschild:


Stützgriff variopunta
Baujahr/SNR Juni-15 / 200-xxxxxx
Max. Belastung 100 kg
Gesamtgewicht 2,0 kg




 delficare GmbH · D-88316 Isny/Allgäu


Stützgriff variopunta
Baujahr/SNR Juni-15 / 350-xxxxxx
Max. Belastung 100 kg
Gesamtgewicht 2,1 kg



 delficare GmbH · D-88316 Isny/Allgäu

Stützgriff variopunta
Baujahr/SNR Juni-15 / 500-xxxxxx
Max. Belastung 100 kg
Gesamtgewicht 2,2 kg



 delficare GmbH · D-88316 Isny/Allgäu

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt.

Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt.

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen

Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler.

Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben.

Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de